



5. **Háttámla:** A háttámla kihajtható rögzítő bilincseit (6. ábra) nyissa ki. A háttámlát támassza a kerekesszék háttámla tartó csöveinek, úgy hogy a háttámla rögzített bilincsei közrefogják a háttámla tartó csöveket a jobb és baloldalon egyaránt (7. ábra). A háttámlát csúsztassa fel vagy le, hogy a mozgó bilincsek mind alul, mind felül a tartócsövek szabad felületével találkozhassanak. A bilincseket erőteljes nyomással hajtsa rá a tartócsőre (8. ábra). A háttámla levételénél fordított sorrendben járjon el.


**FIGYELEM!** Soha ne tegye az ujját az ülés, illetve a bilincsek és a tartó csövek közé. Használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a háttámla megfelelően rögzítve van.

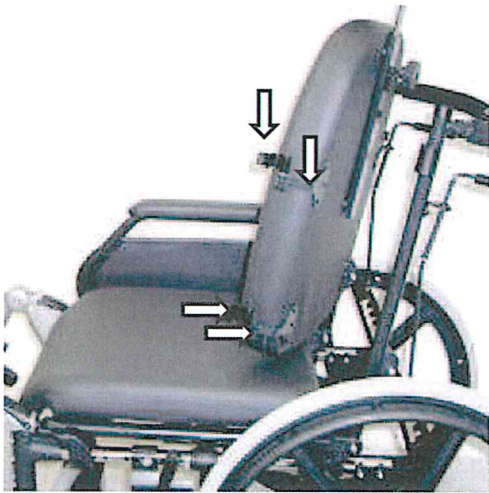


6. ábra

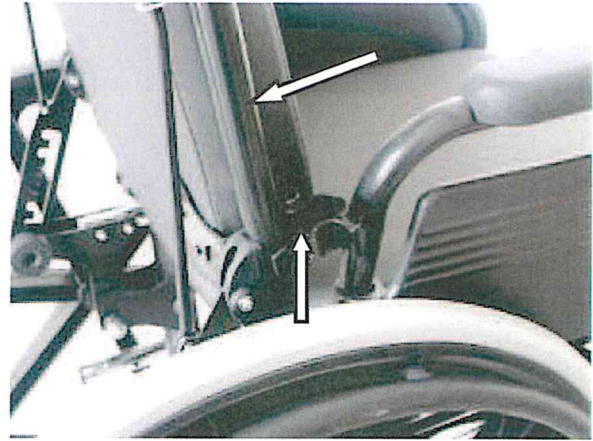

7. ábra

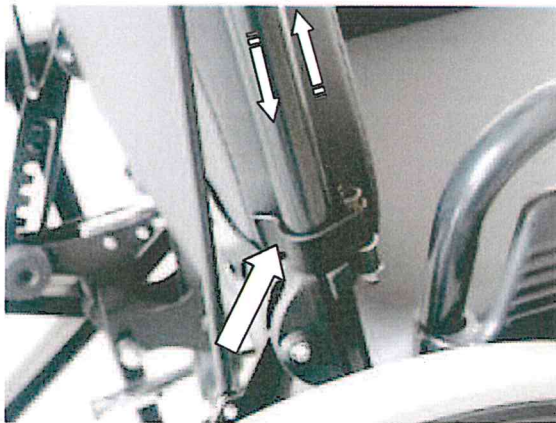

8. ábra

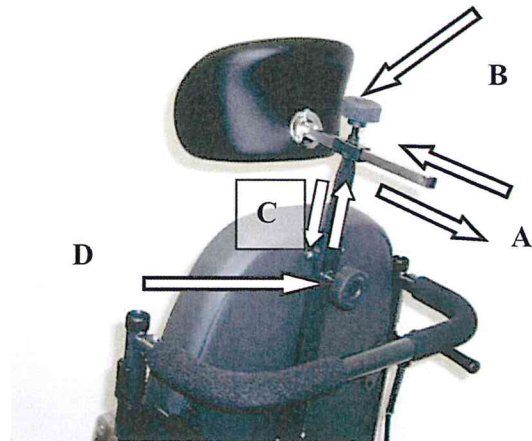


9. ábra

6. **Fejtámla** (9. ábra): A fejtámlát tartó négyszögletes rudat tolja be (A) a négyszögletes hüvelybe körülbelül középállásig, majd a marokcsavarral rögzítse (B). A fejtámla függőleges tartó lemezét dugja a háttámla hátsó felére rögzített vezető hüvelybe (C), állítsa be körülbelül a használatnak megfelelő magasságba, majd a marokcsavarral rögzítse (D).

**FIGYELEM!** Soha ne tegye az ujját a rudazat és a hüvely közé. Használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a fejtámla megfelelően rögzítve van.

7. **Lábtartók** (10. ábra): A lábtartó leszereléséhez oldja a biztosítószerkezetet (A), majd fordítsa el kb. 90°-al, hogy a reteszelés megszűnjön és emelje fel. A lábtartó felszerelésekor a leírtakat fordított sorrendben hajtsa végre.

**FIGYELEM!** Soha ne tegye az ujját a lábtartó és a kerekesszék vázcsőve közé kinyitáskor, illetve összecsakáskor. Használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a lábtartó megfelelően rögzítve van.

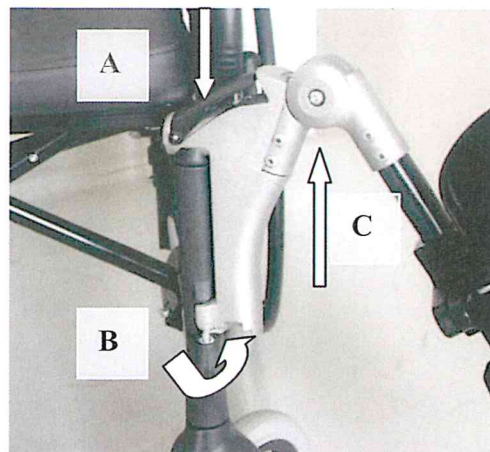

10. ábra


8. **Kartámaszok:** A kartámaszokat a KEZELÉS fejezet 2. pontja (12. ábra) szerint tudja fel- és leszerelni.

## D. KEZELÉS

1. **Lábtartók** (11. ábra,): A lábtartók ki- illetve befordíthatók a biztosító (A) oldalával, majd a lábtartó kívánt irányba történő forgatásával. A talptámasz felemelhető (B), a vádlitámasz önbeálló, ki- és beforgatható (C).



11. ábra

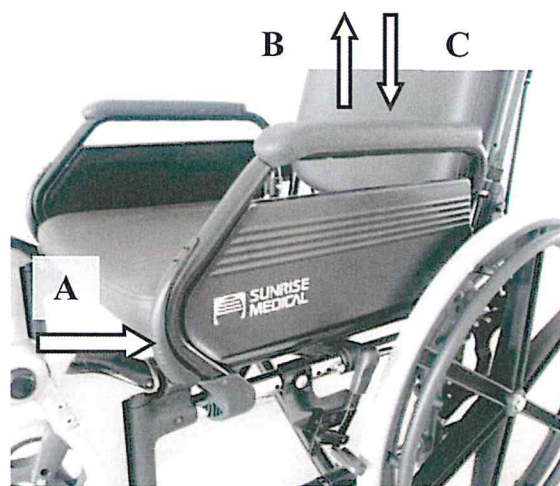

12. ábra

2. **Kartámasz:** A kartámasz kivehető. Erőteljes nyomással oldja a rögzítő mechanizmust (12. ábra, A), majd húzza a kartámaszt felfelé (3. ábra, B), míg a hátsó csőve ki nem emelkedik a váz csővéből. A kartámasz visszahelyezésekor a hátsó csöveket illessze össze, tolja vissza a kartámaszt az alsó helyzetébe, majd egy határozott függőleges nyomással pattintsa helyére a rögzítő mechanizmust.


**FIGYELEM!** Győződjön meg róla, hogy a kartámasz megfelelően rögzítve legyen. Soha ne emelje a kerekesszéket a kartámaszoknál fogva, mert sérülést okozhat a széket használóknak, illetve a segítőnek is. Figyeljen, hogy ne csípje be az ujját, amikor a kartámaszt vissza helyezi a helyére.

## E. BEÁLLÍTÁSOK


1. **Lábtartó magasság** (13. ábra): A lábtartók magasságának beállításához csavarja ki az ábrán látható (A) rögzítő csavart, helyezze át a lábtartót a kívánt helyzetbe, majd rögzítse az új pozícióban. Ehhez 10-es villáskulcsot használhat. A talptámasz a talajhoz 2,5 cm-nél közelebb nem lehet.  
***TILOS a talptámaszra ráállni!***
2. **Vádlitartó** (13. ábra): A vádlitartó magasságát és mélységét 3-3 pozícióba állíthatja. Ehhez lazítsa ki az ábrán látható csavarokat (B, C), állítsa a vádlitartót a megfelelő pozícióba és húzza meg a csavarokat. A csavarokhoz 10-es villáskulcsot használhat.
3. **Lábtartó szögben emelése** (14. ábra): A lábtartók szögben történő állításához az ábrán jelzett nyomógombot (A) nyomja meg, majd a lábtartót emelje fel vagy engedje le a megfelelő pozícióba. A nyomógomb elengedésével a lábtartó rögzül.

**FIGYELEM!** Használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a lábtámaszok megfelelően rögzítve vannak.

**TILOS a kerekesszéket alsó pozícióba állított, lehajtott lábtartókkal használni, mert a lábtartók ez esetben ütközhetnek az első bolygókerekkel!**

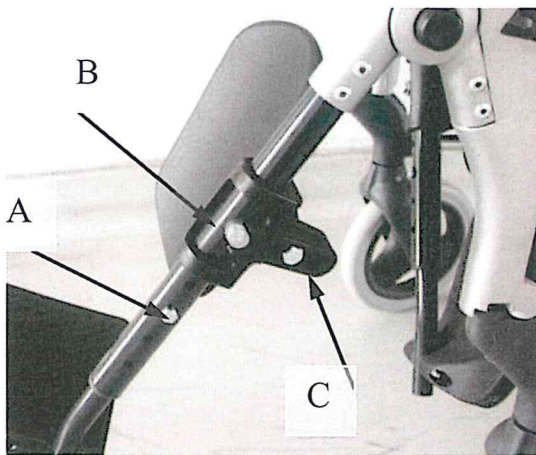


13. ábra

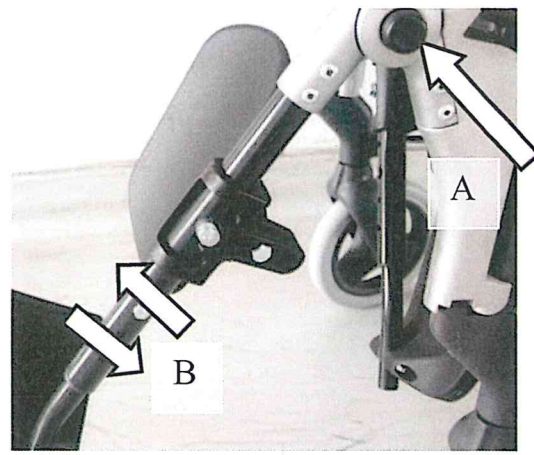


14. ábra

4. **Háttámla döntése, emelése:** Lazítsa meg a reteszelő rudazat rögzítő ábrán látható csavarjait (15. ábra, A) mindkét oldalon. Támassza meg kezeit a kerekesszék tolórúdján (16. ábra, A) és a háttámla reteszelő rudazatot (16. ábra, B), annak fogantyújával (16. ábra, C) emelje meg. Tartsa a rudazatot kiemelve, a háttámlát a megfelelő pozícióba állítsa be, majd a reteszelő rudazatot engedje vissza. Ügyeljen arra, hogy a rudazat visszaengedésekor a rudazat fésűje (15. ábra, B) a helyes pozícióban rögzüljön. A reteszelő rudazat csavarjaival (15. ábra, A) rögzítse a rudazatot.

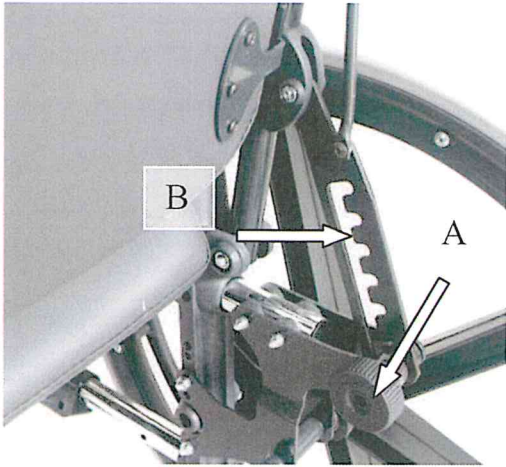

15. ábra

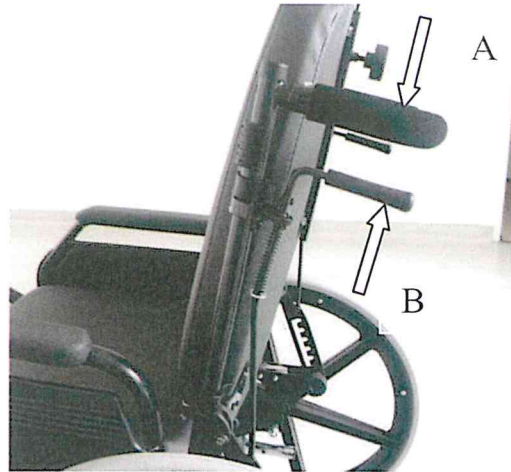

16. ábra

**FIGYELEM!**

- *Használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a háttámla és a reteszelő rudazat megfelelően rögzítve van!*
- *Legyen óvatos, ne csípje be az ujját a háttámla le- és felemelésekor a mozgó alkatrészek közé!*
- *A háttámla leengedésekor a harmadik pozíció után a kerekesszék stabilitása csökken, legyen óvatos!*
- *Mielőtt leengedi a háttámlát, győződjön meg arról, hogy a kerekesszékben ülő keze vagy karja nincs az ülés és a háttámla között, elkerülve az esetleges beszorulást vagy becsípődést!*
- *A dönthető háttámla csak a borulásgátló kerekekkel felszerelt kerekesszéken alkalmazható! Mielőtt használná a háttámla beállítási funkciót, a borulásgátló kerekeket állítsa működő pozícióba!*
- *A háttámla beállítása előtt mindig ellenőrizze, hogy a borulásgátló kerekek a megfelelő pozícióban vannak!*
- *A dönthető háttámla csak a tolókarral, mint merevítő rudazattal felszerelt kerekesszéken alkalmazható. Mindig ellenőrizze, hogy a tolókar mindkét oldalon a megfelelő pozícióban rögzítve van!*
- *Soha ne közlekedjen leeresztett háttámlájú kerekesszékkel!*

5. **Fejtámla** (9. ábra): A fejtámla függőleges és vízszintes helyzetének beállításához lazítsa meg a felfogó rudazat marokcsavarjait, állítsa be a megfelelő pozíciót és rögzítse a rudazatokat. A fejtámla gömbcsuklóval csatlakozik a felfogó rudazathoz, így azt a legmegfelelőbb szögbe állíthatja be.

6. **Fékek** (18. ábra) Kismértékű állításhoz lazítsa meg a felfogó csavar anyáját egy 10-es kulcs segítségével, és csúsztassa előre vagy hátra a fékszerkezetet. Nagyobb beállításhoz vegye ki a csavart, és helyezze a következő helyre. Húzza meg a csavart.



18. ábra

**FIGYELEM!** *Használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a fékszerkezet megfelelően rögzítve van és hatásos.*

## F. ELLENŐRZÉS ÉS KARBANTARTÁS

**KARBANTARTÁS:** A használat ideje alatt minden rögzítést rendszeresen ellenőrizni, beállítani, illetve szükség esetén cserélni kell, különös tekintettel a kerekre, fékekre, kartámaszra, valamint a kárpitra. A kárpitot és a vázat rendszeresen tisztítsa. A tisztításhoz semleges mosószert, és kézmeleg vizet használhat. Makacs szennyeződés esetén kefével dörzsölje át a kárpitot, majd törölje szárazra. A váz fényét megőrizheti, ha tisztítás után autóviasszal áttörli.

**FIGYELEM!** A kárpitot mosógépben mosni, illetve szárító gépben szárítani tilos!

**Megsemmisítés:** A kerekesszék veszélyes alapanyagot nem tartalmaz. Elhasználódás után a fém vázat a fémgyűjtő helyen lehet leadni.

**ELLENŐRZÉS:** A következők rendszeres ellenőrzése segítségével lesz a kerekesszék élettartamának meghosszabbításában, illetve a zavartalan működésében.

**Hetente:** Ellenőrizze, hogy a csuklószervezet középső csavarja szoros és jó állapotú./ Tisztítsa meg a kárpitot./ Tisztítsa meg a vázat száraz ruhával, illetve speciális ápolószerezrel a krómozott felületeket./ Ellenőrizze, és szükség szerint állítsa be a fékeket./ Ellenőrizze a kerekeket.

**3 havonta:** Ellenőrizze, és szükség szerint állítsa be a kerek és a villa holtjátékát./ Olajozza vagy zsírozza a tengelyeket./ Húzza meg a csavarokat.

**Évente:** Javasoljuk, hogy kerekesszékét évente ellenőriztesse a szakszervizben!

## G. MŰSZAKI JELLEMZŐK

**Maximális teherbírás:** 125 kg

**Lábtartó:** Szögben állítható, kihajtható, leszerelhető, magasságban állítható.

**Kartámasz:** kivehető

**Első kerek:** Ø 200 mm tömör

**Hátsó kerek:** Ø 600 mm tömör

**Keréktengely:** fix, menetes rögzítés

**Tartozék:** Használati útmutató a garancia jeggyel

**Pótalkatrészek:** a kerekesszék minden egyes részegysége, mint pótalkatrész rendelhető

**Méretek:**

Modell	Beülő- szélesség*	Ülés- magasság	Beülő- mélység	Háttámla magasság	Teljes szélesség*	Teljes hossz	Tömeg
B-4205	37-52 cm	51 cm	41 cm	52 cm	55-70 cm	115 cm	21 kg

\*3 cm-es emelkedés szerint

## H. JÓTÁLLÁS

A jótállási jegy alapján a gyártó az átadás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállal az általa gyártott termékre.

A jótállás jegy alapján a vásárlót a jótállási időn belül a hibás termék díjmentes kijavítása, vagy ha ez nem lehetséges, kicserélése, árleszállítás, vagy vételár megtérítése illeti meg.

### A vállalat mentesül a jótállási felelősség alól, ha a hiba:

- a termék nem rendeltetésének megfelelő használata miatt következett be (pl.: túlterhelésből),
- a kezelési és karbantartási útmutatóban foglaltak be nem tartása miatt következett be,
- a nem megfelelő tárolás miatt következett be,
- balesetből származó sérülésekből következett (pl.: váz sérülése),
- elemi kár, vagy egyéb (rongálás, állat okozta kár, lopás, gondatlanság stb.), az átadás után keletkezett okból következett be.

Nem tekinthető jótállás szempontjából hibának a természetes használatból eredő kopások következtében szükségessé váló után állítások, a gumik (köpeny és tömlő), üléskárpit-, karfakopás és sérülés.

### Nem tekinthető jótállás szempontjából hibának:

- a természetes használatból eredő kopások (pl.: kárpit, gumik, kerekek stb.),
- a természetes használat során szükségessé váló után állítás,

### Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha

1. A terméken a jótállást vállaló szervén kívül másvalaki bárminemű szerelést, javítást, átalakítást végzett, az így átalakított vagy javított szerkezeti egységekre.
2. A termék elemi csapás miatt megsérül, a sérült szerelési egységekre, valamint a sérüléssel összefüggő műszaki meghibásodás tekintetében.
3. A terméket váltott személyek használják vagy túllépik a kezelési útmutatóban feltüntetett terhelést.
4. Az üzemeltető kárenyhítési kötelezettségének nem tesz eleget (pl.: a hiba észlelését követően további használattal az érintett szerkezeti rész tovább károsodik.).
5. A jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (blokk, nyugta, számla) elvész.

### A vásárló a jótállási igényét jótállási jeggyel érvényesítheti.

A jótállás meghosszabbodik azzal az időtartalommal, amely a termék átvételétől, illetve a hiba bejelentésétől addig az időpontig tart, amíg a termék ismét rendeltetészerűen újra használhatóvá válik.

Ha a hiba jellegével kapcsolatban vita merül fel, a gyártó vállalatot terheli a bizonyítási kötelezettség.

A garanciális hibák, valamint a jótállási időn túli javítás – szervizelés bejelentése a **Szervizkönyvben** feltüntetett egységeknél lehetséges.

Jótállási javítás esetén a javítást végzőnek fel kell tüntetni:

- az igény bejelentésének időpontját,
- hibajelenséget,
- a javítás módját és idejét,
- a jótállás meghosszabbított új határidejét,
- a főszervények cseréjét, és az erre vonatkozó jótállás határidejét.

A jótállási jegyen bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállás megszűntetését vonja maga után.

A jótállási munka kizárólag csak érvényes jótállási jegy alapján, egy számozott szelvény bevonása ellenében végezhető.

A jótállási jegy, javítási szelvényeket tartalmaz. A jótállási javításnál egy ellenőrző szelvényt a munkalaphoz kell csatolni, és a főszelvényt, a javítást végzőnek ki kell tölteni!

**A Használati útmutatót a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!**

Név:	<b>JÓTÁLLÁSI JEGY</b> <b>B-4205 típusú</b> <b>Önhajtós kerekesszékhez</b>	TAJ szám:
------	---	-----------

**Eladószerv tölti ki!**

A vásárlás napja 20..... hó ..... nap. ....  
( hónap betűvel) aláírás (P.H.)

Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre

Levágandó jótállási, javítási szelvények

Bejelentés ..... <b>5</b> Bejelentett hiba: ..... Elhárított hiba leírása: ..... A jótállás új határideje: ..... Munkalapszám: ..... Kelt: ..... 20..... hó .... nap. .... aláírás (P.H.).....	<b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b> <b>5</b> Típus: <b>B-4205</b> ..... Gyártási szám: ..... Kelt: ..... 20..... hó .... Eladó ..... aláírás
Bejelentés ..... <b>4</b> Bejelentett hiba: ..... Elhárított hiba leírása: ..... A jótállás új határideje: ..... Munkalapszám: ..... Kelt: ..... 20..... hó .... nap. .... aláírás (P.H.).....	<b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b> <b>4</b> Típus: <b>B-4205</b> ..... Gyártási szám: ..... Kelt: ..... 20..... hó .... Eladó ..... aláírás
Bejelentés ..... <b>3</b> Bejelentett hiba: ..... Elhárított hiba leírása: ..... A jótállás új határideje: ..... Munkalapszám: ..... Kelt: ..... 20..... hó .... nap. .... aláírás (P.H.).....	<b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b> <b>3</b> Típus: <b>B-4205</b> ..... Gyártási szám: ..... Kelt: ..... 20..... hó .... Eladó ..... aláírás
Bejelentés ..... <b>2</b> Bejelentett hiba: ..... Elhárított hiba leírása: ..... A jótállás új határideje: ..... Munkalapszám: ..... Kelt: ..... 20..... hó .... nap. .... aláírás (P.H.).....	<b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b> <b>2</b> Típus: <b>B-4205</b> ..... Gyártási szám: ..... Kelt: ..... 20..... hó .... Eladó ..... aláírás
Bejelentés ..... <b>1</b> Bejelentett hiba: ..... Elhárított hiba leírása: ..... A jótállás új határideje: ..... Munkalapszám: ..... Kelt: ..... 20..... hó .... nap. .... aláírás (P.H.).....	<b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b> <b>1</b> Típus: <b>B-4205</b> ..... Gyártási szám: ..... Kelt: ..... 20..... hó .... Eladó ..... aláírás



**A REHAB-TRADE KFT. GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKŐZ  
JAVÍTÁSRA SZERZŐDÖTT PARTNEREI:**

**REHAB-ÉSZAK KFT.**

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3. Tel.: 06/46 508-284  
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125. Tel.: 06/35 300-224  
3300 Eger, Knézich u. 20. Tel.: 06/36 320-826  
3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.) Tel.: 06/47 560-130

**REHAB-GENERAL KFT.**

1044 Bp., Reviczky utca 38.. Tel.: 06/1 320-1606  
7400 Kaposvár, Iszák út 42. Tel.: 06/20 219-5601  
7636 Pécs, Malomvölgyi út 21.: Tel.: 06/20 264-9680

**REHAB-HUNGARIA KFT.**

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B. Tel.: 06/62 553-480

**REHAB-TISZA KFT.**

5310 Kisújszállás, Északi Ipartelep II. Tel.: 06/59 520-576  
5600 Békéscsaba Bartók B. út 46-50 Tel.: 06/59 553-480

**GYSGY-REHA KFT.**

2800 Tatabánya, Madách u. 11. Tel.: 06/34 300-787

**PRÍMA PROTETIKA KFT.**

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35. Tel.: 06/66 441-137  
Tel.: 06/20 952-2135

**Figyelem!**

Az eszköz nem rendeltetésszerű használatából, az eszköz nem megfelelő tárolásából, tisztításából eredő károk, meghibásodások társadalombiztosítási támogatással nem javíthatók. Az ilyen jellegű meghibásodások, csak a tulajdonos költségére javíthatók.

**SZERVIZKÖNYV**

.....gyártási számú kerekesszékhez/mopedhez

Az eszközt gyártó/forgalmazó cég: Rehab-Trade Kft.

Az eszköz megnevezése: Transzit önhajtós kerekesszék

Az eszköz típusa: B-4205

TB finanszírozott szervizjogosultság utolsó időpontja:

.....

Kiadva:

Név: .....

TAJ szám: .....

Kiadta (bélyegző/aláírás):

A kiadás időpontja: .....

**Figyelem!**

A szervizkönyvet őrizze meg a kihordási idő végéig, mert javítást társadalombiztosítási támogatással csak a szervizkönyv birtokában tudnak a javító egységek vállalni. Társadalombiztosítási támogatás igénybevétele, csak az jogosult, akinek eredetileg az eszközt felírták.

Gyártó meghatalmazott képviselője (neve, címe)	A hiba leírása	AZ ELVÉGZETT MUNKA MEGHATÁROZÁSA	A JAVÍTÁS NETTÓ DÍJÖSSZEGE	A JAVÍTÁS IDŐPONTJA / ALÁÍRÁS

Gyártó meghatalmazott képviselője (neve, címe)	A hiba leírása	AZ ELVÉGZETT MUNKA MEGHATÁROZÁSA	A JAVÍTÁS NETTÓ DÍJÖSSZEGE	A JAVÍTÁS IDŐPONTJA / ALÁÍRÁS